



Bruksanvisning for uttak av avføringsprøver hos dyr

En demovideo for prøveuttak finner du her:

<https://www.ntnu.no/web/hunt4/hvorfor-delta>

1. Bruk så fersk avføring fra dyret /dyrene dine som mulig
2. Kontroller at prøvesettet er stemplet for rett dyreart (dyr påstemplet) og at svarskjema og prøvesett har likt nummer. Det er et prøvesett og svarskjema per dyr.
3. Ta på de medfølgende hanskene. Bruk den medfølgende trespatelen til å samle opp en liten mengde avføring (tilsvarende en liten teskje fra hvert dyr).
4. Påfør avføringen tynt i begge feltene på prøvesettet. Dekk hele feltet.
5. La kortet tørke på høykant i minst 2 timer før du bretter det sammen.
6. Legg deretter kortet tilbake i den folierte, blanke konvolutten sammen med den lille posen merket Silica gel.
7. Se til at den blanke konvolutten har samme nummer som prøvesettet. Den blanke konvolutten med prøven legges i den ferdig frankerte konvolutten sammen med utfyllt svarskjema og sendes i posten så snart som mulig.

Tusen takk for ditt bidrag til Én Helse-forskning!